

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017


TÊN THIẾT BỊ: BỘ TRUYỀN MÁU

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chỉ định sử dụng	Được dùng để truyền máu vào cơ thể bệnh nhân
2	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1. Chọn loại dây phù hợp với yêu cầu chuyên môn.2. Kiểm tra kỹ và loại bỏ ngay nếu bao bì bị hư hại hoặc quá hạn.3. Bóc bao bì theo đường cắt chỉ dẫn. Lấy dây truyền ra ngoài kiểm tra xem đầu bảo vệ có bị rời ra hay khoá nối có đủ chặt hay không.4. Chốt khoá kiểm soát dòng chảy, mở đầu nắp bảo vệ.5. Cho dịch truyền vào 1/2 bầu bằng cách bóp nhẹ vào bầu dịch, mở khoá kiểm soát lưu lượng để đẩy khí trong dây ra ngoài.6. Đóng khoá kiểm soát lưu lượng lại, mở khoá bảo vệ kim, cắm kim vào ven bệnh nhân và cố định lại; mở khoá kiểm soát lưu lượng từ từ đến khi đạt mức yêu cầu, quan sát tốc độ nhỏ giọt.7. Nên treo chai(túi) dịch cao khoảng một mét so với điểm cắm kim để đảm bảo đủ tính chất vật lý(theo định luật hấp dẫn)
3	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn- Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn- Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp- Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng- Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

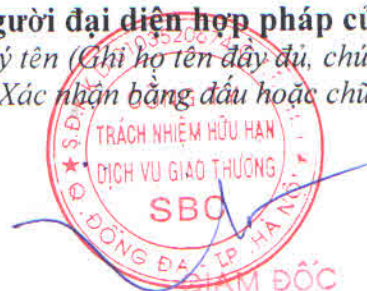

Nguyễn Ngọc Thái