

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017

TÊN THIẾT BỊ: DÂY TRUYỀN DỊCH CÓ BẦU PHA THUỐC

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chi định sử dụng	<p>Dây truyền dịch được dùng để đưa vào cơ thể bệnh nhân thuốc và dung dịch qua đường tĩnh mạch.</p> <p>Dây truyền dịch có bầu pha thuốc, việc truyền nhiều hơn một loại dịch (thuốc) cùng lúc sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.</p> <p>Sản phẩm chỉ sử dụng một lần</p> <p>Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO.Hạn sử dụng 5 năm..</p>
2	Hướng dẫn sử dụng	<p>Xem hình minh họa trên bao bì sản phẩm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đóng tất cả các khoá. Mở van lọc 'B'. Dựng ngược chai dịch truyền và cắm đầu nhọn của dây vào giữa nắp chai dịch. Giữ nguyên chai dịch. Đối với chai dịch truyền bằng vật liệu cứng thì mở đầu lọc 'A'. Đối với chai dịch mềm thì đóng khoá A. 2. Mở khoá lần 'A'. Điều chỉnh cho dịch truyền chảy vào bầu pha thuốc. Đóng khoá lần 'A' và bóp nhẹ vào bầu nhỏ đến khi dịch truyền chiếm một nửa bầu. 3.Nối khoá cuối dây truyền với dụng cụ tiêm truyền. Mở khoá lần 'B' và để cho dịch truyền chảy ra với mục đích đẩy khí trong dây ra ngoài sau đó đóng khoá lần B. 4.Mở khoá lần A và đưa dịch truyền vào bầu pha thuốc theo chỉ định sau đó đóng khoá lần A. 5. Bắt đầu quá trình truyền dịch. Điều chỉnh tốc độ truyền dịch qua khoá lần B <p><u>Cách kiểm soát quá trình:</u></p> <p>Đo mực nước dịch truyền trong bầu pha thuốc: Đóng khoá lần A và để mở khoá lần B. màng lọc sẽ tự động đóng lại khi không còn dịch truyền trong bầu.</p> <p><u>Để tiếp tục truyền dịch:</u></p> <p>Mở đầu lọc B và giữ nguyên khoá lần B. Mở khoá lần A, bơm đủ dịch truyền theo yêu cầu vào bầu pha thuốc và đóng khoá lần A. Để bắt đầu lại quy trình, bóp nhẹ vào bầu nhỏ để mở màng lọc. Nếu bơm vào bầu nhỏ qua nhiều thì đóng tất cả các khoá lại và dốc ngược bầu pha thuốc. Bóp nhẹ vào bầu nhỏ để đẩy phần thừa trong bầu pha ra ngoài . Sau đó điều chỉnh lại các khoá như cũ.</p>



		<p><u>Thực hiện truyền dịch với các loại thuốc khác nhau:</u></p> <p>Bơm trực tiếp vào chai dịch truyền: Bơm tiêm các loại thuốc theo yêu cầu trực tiếp vào chai dịch truyền phía trên đầu cắm.</p> <p>Bơm vào bầu pha thuốc: Mở khoá lọc B và đóng khoá A. Vệ sinh vùng bơm và bơm trực tiếp thuốc vào với bơm tiêm tiêu chuẩn.</p> <p>Bơm vào cổng chữ Y: Vệ sinh vùng bơm. Dùng bơm tiêm có kim bơm thuốc qua đầu chữ Y.</p>
3	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn - Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn - Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp - Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất - Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần - Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng - Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thái