

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017

TÊN THIẾT BỊ: DÂY TRUYỀN DỊCH

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chỉ định sử dụng	Dùng để đưa dung dịch và thuốc vào cơ thể bệnh nhân: - Hồi phục lại khối lượng tuần hoàn đã mất của cơ thể: trong các trường hợp ỉa chảy mất nước, bông nặng, mất máu, xuất huyết... - Đưa thuốc vào cơ thể: khi muốn cho thuốc ngấm đều và duy trì nhiều giờ hoặc nhiều ngày một lượng thuốc hằng định trong máu. - Nuôi dưỡng bệnh nhân: khi bệnh nhân không ăn uống được: bệnh nhân hôn mê, tổn thương thực quản, đường tiêu hóa. - Các mục đích khác: giải độc, lợi tiểu trong trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc.
2	Hướng dẫn sử dụng	1. Đóng khoá lãn. 2. Tháo chốt bảo vệ đầu cắm và cắm đầu nhọn vào chai(túi) dịch truyền. 3. Cố định chai(túi) dịch truyền. Bơm dịch truyền vào 1/2 bầu dịch bằng cách bóp nhẹ bầu. Không được bơm vào đầy bầu. 4. Kết nối khoá cuối dây với kim luồn. Tháo đầu bảo vệ kim luồn bằng cách cầm ngược kim lên. 5. Mở khoá lãn để cho dịch truyền chảy qua dây ra ngoài nhằm đẩy hết khí sau đó đóng khoá lãn lại. 6. Thực hiện quá trình truyền dịch và kiểm soát tốc độ truyền dịch bằng khoá kiểm soát dòng chảy. 7. Sử dụng công chữ Y nếu cần truyền bổ sung các loại thuốc khác.
3	Cảnh báo và thận trọng	- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn - Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn - Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp - Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất - Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần - Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng - Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thùy