

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017

TÊN THIẾT BỊ: ỚNG THÔNG ĐƯỜNG TIỂU

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chỉ định sử dụng	<p>Là ống mềm chất liệu cao su phù silicon đặt trong cơ thể bệnh nhân để thoát nước tiểu từ bàng quang hoặc bơm chất lỏng vào bàng quang. Sử dụng trong các trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bệnh nhân gặp khó khăn khi di chuyển hoặc nằm liệt giường, những trường hợp bí đái - Trước khi mổ: u xơ tuyến tiền liệt, mổ đê, phẫu thuật - Để chuẩn đoán hoặc bơm thuốc vào để điều trị bệnh bàng quang, đường tiết niệu
2	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bôi trơn đầu và trục ống thông đường tiểu 2. Cần thận chèn ống thông qua niệu đạo vào bàng quang, sau đó đẩy thêm 3cm nữa để đảm bảo rằng bóng chèn cũng nằm bên trong bàng quang 3. Sử dụng bơm tiêm để làm căng bóng chèn theo thể tích được đánh dấu trên phễu của ống thông 4. Rút ống thông: Cắt van bơm hơi một chiều hoặc dùng xilanh không cần kim hút hết không khí ở bóng chèn ra 5. Lưu ống thông trong cơ thể bệnh nhân không quá 7 ngày
3	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn - Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn - Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp - Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất - Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần - Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng - Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thuì