

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017

TÊN THIẾT BỊ: ỒNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chỉ định sử dụng	Là phương tiện thực hiện việc hô hấp cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật hoặc người mất khả năng thở
2	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none">Bóc lớp vỏ bảo vệ một cách cẩn thận.Đảm bảo ống nối 15mm được kết nối đủ chặt với ống đặt nội khí quản nhằm ngăn không bị tuột ra trong quá trình sử dụng.Kiểm tra kỹ thông tin và tình trạng của ống sau mở trước khi sử dụng.Kiểm tra bóng chèn, van bơm hoặc các bộ phận khác đảm bảo tính kết nối cũng như không bị rò rỉ trước khi sử dụng. Nắp đầu bơm chuẩn vào bơm tiêm và bơm một lượng hơi đủ để kích hoạt bóng chèn.Sau khi kích hoạt thử và kiểm tra, hãy làm căng bóng hoàn toàn.
3	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên mônChỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹnBảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếpHạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuấtSản phẩm chỉ sử dụng 1 lầnKhông sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụngSử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thái