

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017

### TÊN THIẾT BỊ: TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chỉ định sử dụng	Dùng để tích nước tiểu từ bệnh nhân
2	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết nối túi nước tiểu với ống thông đường tiểu</li><li>- Đầu nối với ống thông đường tiểu có hình tháp, kết cấu kiểu bậc thang giúp túi kết nối chặt chẽ với ống thông đường tiểu</li><li>- Dây dài 90cm</li><li>- Có hai lỗ treo (có mắc treo bằng nhựa)</li><li>- Có van chống trào ngược</li><li>- Túi nước tiểu được xử lý bằng công nghệ đóng kín kép, đảm bảo 100% chống rò rỉ</li><li>- Trên túi có thang đo dung tích từ 100 ml đến 2000 ml và bảng ghi tên bệnh nhân</li><li>- Van xả chữ T thuận tiện trong việc thoát nước mà không làm bẩn tay</li></ul>
3	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn</li><li>- Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn</li><li>- Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp</li><li>- Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất</li><li>- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần</li><li>- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng</li><li>- Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất</li></ul>

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thái